

رطوبت ساز و مه ساز سرد و گرم



مدل : HI-AH26

hi-tec

مشخصات کلی دستگاه

- حجم مخزن : 7 لیتر
- ولتاژ ورودی : 230 ولت
- حداکثر میزان رطوبت : 400 میلی لیتر در ساعت
- توان مصرفی : 30 وات (بخار سرد) و 130 وات (بخار گرم)
- ابعاد : 324x 201x 350 mm
- وزن : 2 کیلوگرم
- متراژ تحت پوشش : 40-55 متر مربع


ویژگیهای رطوبت ساز مدل HI-AH26

- استریل کننده چند منظوره هوا
- دارای قابلیت قرار دادن فیلتر قابل تعویض به منظور از بین بردن رسوبات آب (اختیاری)
- از بین برنده باکتری ها و ویروسهای موجود در آب قبل از ایجاد بخار
- دارای مخزن حجیم 7 لیتری
- فیلتر کننده ذرات ریز موجود در هوا
- جذب کننده گرد و غبار معلق در هوا
- جذب کننده انواع دود سیگار و دیگر بوهای ناخوشایند
- تنظیم غلظت مه توسط کلید مدور تعبیه شده روی دستگاه
- خاموش شدن خودکار به محض رسیدن به میزان رطوبت مطلوب
- دارای چراغ خواب برای رنگین کردن شبهای شما
- خاموش شدن خودکار به محض اتمام آب مخزن
- دارای مخزن آب شفاف برای مشاهده آسان میزان آب

نحوه راه اندازی دستگاه

- ابتدا دستگاه را از برق کشیده و از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- دسته مخزن آب را نگه داشته و آنرا مستقیم به سمت بالا بکشید. سپس سرپوش مخزن را که زیر آن تعبیه شده در جهت عقربه های ساعت چرخانده و باز کنید.
- مخزن را با آب سرد و تمیز پر کرده و سرپوش را ببندید.
- ◀ توجه کنید که هرگز از آب گرم برای پر کردن دستگاه استفاده نکنید، زیرا این امر ممکن است باعث نشتی شود.
- سپس مخزن آب را روی بدنه اصلی قرار دهید. انگاه آب مخزن به مقدار لازم به داخل محفظه آبیگر منتقل میشود.
- سپس دستگاه را به برق وصل کنید.

نحوه استفاده

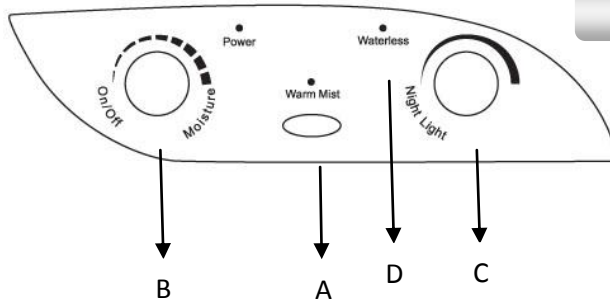

- به منظور فعال یا غیر فعال کردن بخور گرم دکمه A را بفشارید.
- با چرخاندن دکمه مدور B دستگاه خاموش و روشن میشود.
- همچنین غلظت مه ایجاد شده با چرخش دکمه B به صورت ساعتگرد افزایش می یابد.
- توصیه میشود شب هنگام از کمترین میزان مه استفاده کنید.
- دکمه C جهت فعال کردن چراغ شب میباشد.
- هنگامیکه دستگاه نیاز به آب داشته باشد چراغ D چشمک میزند.

با محصولات متنوع هایتک شادابی و طراوت را تجربه کنید

نحوه تعویض فیلتر کارتریج

- قبل از خالی کردن مخزن آب از متصل نبودن دستگاه به برق اطمینان حاصل کنید.
- مخزن آب را وارونه کرده و سرپوش آن را باز کنید. فیلتر زیر سرپوش قرار دارد.
- فیلتر مستعمل را درآورده و فیلتر جدید را جایگزین آن کنید.
- بهتر است هر 6 ماه یکبار فیلتر دستگاه را تعویض کنید.

نکات مهم

- هنگام ریختن و خالی کردن آب دستگاه اطمینان حاصل نمایید که دستگاه حتماً از پریز برق جدا شده باشد.
- از برخورد سیم با سطوح گرم جداً خودداری کنید.
- دستگاه باید حداقل 10 cm بادیاوار و پریز برق فاصله داشته باشد.
- دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از دستکاری و تعمیر خودسرانه دستگاه پرهیز کنید.
- دستگاه را روی یک سطح صاف و سخت و به فاصله 60 سانتیمتر از زمین قرار دهید.
- هنگام کار کردن دستگاه از تکان دادن، کج کردن و خالی کردن آب دستگاه جداً خودداری کنید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی از جدا کردن سیم برق از پریز با دست خیس بپرهیزید.
- برای تمیز کردن دستگاه به هیچ عنوان از مواد شیمیایی استفاده نکنید.
- از افزودن موادی مانند اکالیپتوس، اسانس نعناع و ... به آب درون دستگاه جداً خودداری کنید. در صورت بروز مشکل دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
- بجز مخزن آب در منافذ دیگر آب نریزید و از خیس شدن دستگاه جلوگیری کنید.
- تحت شرایطی که رطوبت بیش از اندازه باعث تجمع آب و مرطوب شدن شیشه ها و وسایل شود دستگاه را خاموش کنید.
- قبل از استفاده، از مطابق بودن ولتاژ دستگاه با ولتاژ برق اطمینان حاصل کنید.
- دستگاه را در محلی که ممکن است ضربه یا صدمه ای به آن وارد شود نگهداری نکنید.

جدول وقوع مشکلات احتمالی

علل و راه حل	معايب
<p>◀ کابل برق را به پریز متصل کنید</p>	<p>دستگاه روشن نمیشود</p>
<p>◀ مخزن آب خالی است. آن را پر کنید</p>	<p>چراغ دستگاه روشن است ولی رطوبت ایجاد نمی کند</p>
<p>◀ مخزن آب را خالی کرده و 12 ساعت در محیط خشک و خنک قرار دهید. ◀ آب درون دستگاه به مدت طولانی باقی مانده است. آن را تخلیه کرده و مجدداً با آب تمیز پر کنید</p>	<p>بوی نامطبوع</p>
<p>◀ مقدار آب درون مجاری آب زیاد است. کمی از آب را تخلیه کنید.</p>	<p>چراغ دستگاه روشن است ولی دستگاه کار نمی کند</p>
<p>◀ مبدل کثیف شده است. آن را با یک برس نرم تمیز کنید. ◀ آب درون دستگاه کثیف است یا آب به مدت طولانی در دستگاه باقی مانده است. مخزن آب را تمیز نموده و آن را پر کنید.</p>	<p>رطوبت ایجاد شده کم است</p>
<p>◀ آب درون مخزن کم است. مخزن را پر کنید. ◀ دستگاه در یک محل بی ثبات و نامناسب قرار گرفته است. آن را روی سطح صاف و سفت قرار دهید.</p>	<p>صدای غیر طبیعی</p>
<p>◀ اطراف درپوش را به آب و صابون آغشته کنید تا براحتی آن را باز کنید.</p>	<p>درپوش مخزن سفت بسته شده است</p>

قیمت مناسب، کیفیت برتر و گارانتی مطمئن

♥ درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

گزیده ای از محصولات های تک


انواع ترازوهای دیجیتال خانگی و تشخیصی



HI-DS42-I



HI-DS42-B

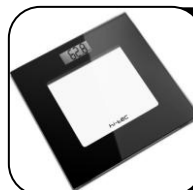

HI-DS42-C



HI-DS42-D



HI-DS42-E



HI-DS52



HI-DS54



HI-DS84



HI-DS96



HI-DS56



HI-DS58



HI-AS62



HI-AS64



HI-AS65



HI-AS66



HI-DS82



HI-DS85



HI-AS68

انواع ترازوهای دیجیتال آشپزخانه



HI-K72



HI-K75



HI-K86



HI-K92



HI-KS24



HI-KS28

انواع فشارسنج های دیجیتال مچی و بازویی



HI-BM42



HI-BM46



HI-BM48



HI-BM52



HI-BM54



HI-BM58

انواع رطوبت ساز و مه ساز، گام سنج، تب سنج ،ترازوی چمدان و...



HI-AH25



HI-AH26-FS



HI-AH28-FS



HI-PM12



HI-DT33



HI-LS83

انواع ماساژورهای دستی، بالشتی، چشمه، گردن، روکش صندلی، کمربند لاغری و...



HI-HM416



HI-HM421



HI-HM423



HI-HM426



HI-HM432



HI-CM322



HI-EM212



HI-SM112



HI-PM356



HI-BM114



HI-BM116



HI-PM362

hi-tec

www.hitec-med.ca

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر مراجعه
نمائید.

www.hiteciran.com

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 