

HI-DS42


ترازوی دیجیتال فوق باریک و متفاوت در نقش و طراحی



hi-tec

HI-DS42

ترازوی دیجیتال فوق باریک و متفاوت در نقش و طراحی

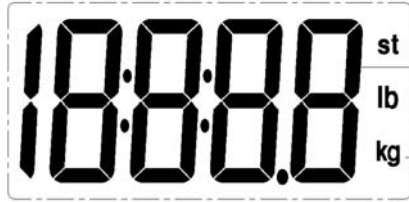


واحد وزن

وزن اندازه گیری
شده

نمایشگر بزرگ برای خواندن آسان اعداد

- ظرفیت: ۱۵۰ کیلوگرم
- ۱۵۰kg/ ۳۳۰lb
- نمایشگر ظرفیت بیش از حد: "-----"
- نمایشگر اتمام باتری: "LO"
- منبع تغذیه: باتری (1×CR2032)
- دقت ترازو: ۱۰۰ گرم
- دمای محل نگهداری دستگاه: ۰~۴۰ درجه سانتیگراد
- اندازه سطح ترازو: ۳۰×۳۰ سانتیمتر
- ارتفاع ترازو: ۱۸ میلیمتر

سطح گسترده برای ایستادن راحت

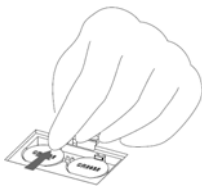

نحوه تعویض باتری

- از قرار گرفتن صحیح سرهای +/- باتری اطمینان حاصل نمایید.
- از ابزار مناسب جهت تعویض باتری ها استفاده نمایید.
- روکش نایلونی روی باتری را قبل از استفاده از روی آن جدا نمایید.

انتخاب واحد اندازه گیری

جهت انتخاب واحد اندازه گیری مورد نظر خود کلید پشت ترازو را فشار دهید.

تلفیقی از صنعت، تکنولوژی و هنر

نحوه اندازه گیری

۱. کلید "UNIT" را فشار دهید تا ترازو روشن شود و امکان تغییر واحد وجود داشته باشد.



۲. پس از انتخاب واحد اندازه گیری (کیلوگرم) ترازو را بر سطح صاف (از قرار دادن ترازو بر روی موکت، فرش و یا سطح شیب دار جداً خودداری نمایید) قرار داده و اجازه دهید تا دستگاه خاموش شود.
۳. بر روی ترازو ایستاده تا دستگاه روشن شود و پس از چند بار چشمک زدن وزن اندازه گیری شده نمایش داده می شود و پس از ۱۰ ثانیه دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.
۴. در صورتیکه برای مدت طولانی از ترازو استفاده نمی کنید از قرار دادن اجسام بر روی آن جداً خودداری کنید.

نکات مهم جهت استفاده صحیح

- بدون استفاده از جوراب و دمپایی از ترازو استفاده کنید.
- از قرار دادن ترازو بر روی موکت، فرش و یا سطح شیب دار جداً خودداری نمایید.
- هنگام استفاده از ترازو پاهای خود را خشک کرده و همچنین از خشک بودن سطح ترازو اطمینان حاصل نمایید.
- از قرار دادن ترازو در کنار امواج الکترو مغناطیس (راديو و ...) خودداری کنید.
- هنگامیکه ترازو روشن است یکبار از آن برای وزن کردن استفاده کنید، برای وزن کردن دوباره کمی صبر کنید تا دستگاه خاموش شود و سپس اندازه گیری را انجام دهید، در غیر این صورت دستگاه بیش از مقدار وزن شما را نشان خواهد داد.

♥ درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکتهای مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است. های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

« شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران »
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر
مراجعه نمایید.

www.hitec-med.ir

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 