

دفترچه راهنمای فارسی

شیر دوش برقی

هایتک



مدل EBP - 3110


♥ مشخصات فنی دستگاه :

- فاقد BPA
- عملکرد با کمترین صدا
- سیستم جلوگیری از بازگشت شیر (anti- reflux Mechanism)
- 9 درجه تنظیم قدرت مکش
- دارای 2 فاز (ماساژ سینه - دوشیدن شیر)
- شبیه سازی مکش نوزاد
- کم حجم ، سبک و قابل حمل

♥ اجزای دستگاه :


شماره	نام	جنس	دمای مرطوب	تعداد
1	روکش جلوگیری نفوذ خاک	PP	-20~ 120c°	1
2	سری ماساژ دهنده سیلیکوژل	سیلیکوژل مایع	-20~ 200c°	1
3	سری متصل شونده به سینه	PP	-20~ 120c°	1
4	قاب پایینی محافظ برگشت شیر	PP	-20~ 120c°	1
5	ژل محافظ برگشت شیر سیلیکونی	سیلیکوژل مایع	-20~ 200c°	1
6	قاب بالایی محافظ برگشت شیر	PP	-20~ 120c°	1

7	شلنگ	PP	-20~ 70c°	1
8	دریچه ورود شیر به بطری	سیلیکون	-20~ 200c°	2
9	پایه بطری	PP	-20~ 120c°	2
10	بطری (MI150)	PP	-20~ 120c°	1
11	دستگاه اصلی	ABS	-20~ 80c°	1
12	درب بطری	PP	-20~ 120c°	1
13	پستانک	سیلیکوژل مایع	-20~ 200c°	1
14	درب پیچی بطری	PP	-20~ 120c°	1
15	درپوش بطری	PP	-20~ 120c°	1
16	آداپتور برق	----	-----	1

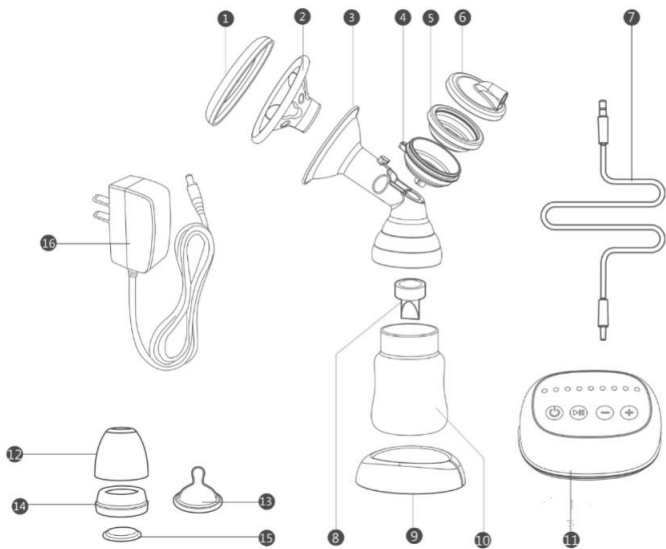


♥ نحوه سرهم کردن :

1) سری ماساژ دهنده سیلیکو ژلی 2) را درون سری شیبور شکل پمپ 3) قرار دهید و از محکم شدن آن مطمئن شوید. (مطابق شکل A)

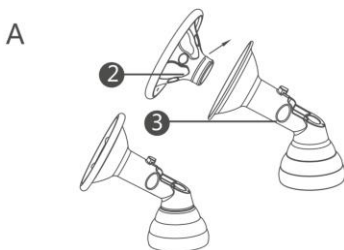

2) محافظ برگشت شیر سیلیکو ژلی 5) را درون قاب پایینی خود 4) قرار داده و قاب بالایی 6) را روی قاب پایینی پیچ کنید (مطابق شکل B)

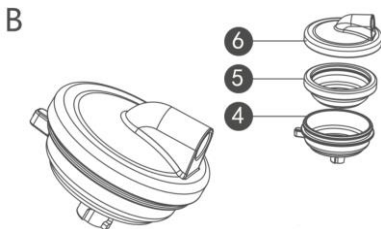


3 (قاب های پیچ شده روی هم مرحله قبل را بصورت عمودی درون سوراخ واقع در بالای سری شیپور شکل پمپ 3 فرو کنید و آن را کمی ساعتگرد بچرخانید تا در جای خود محکم شود . (مطابق شکل C)

C




4 (درپچه سیلیکونی ورود شیر 8 را به زیر سری پمپ 3 فرو کنید . (مطابق شکل D)

D

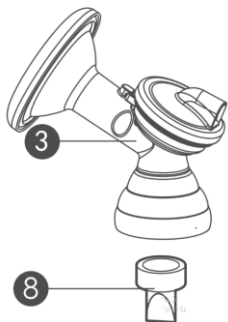

5

5) شیشه شیر 10 را به زیر پمپ شیر 3 که در مرحله قبل سر هم کردید پیچ کنید.
(مطابق شکل E)

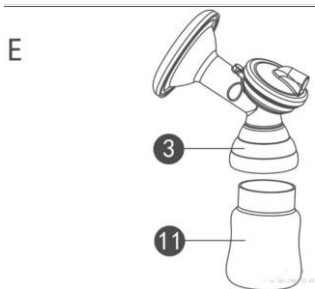


6) یک سر شلنگ اتصال را درون سوراخ واقع در قاب بالای محافظ برگشت شیر فرو کرده و سر دیگر آن را درون سوراخ واقع در کنار دستگاه وارد کنید. (مطابق شکل F)




6

7) هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، شیشه شیر را درون پایه (Base) خود قرار دهید. (مطابق شکل G)

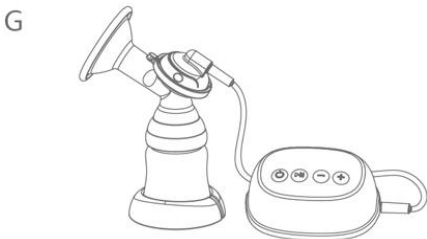


♥ اتصال به برق :

دوشاخه سیم آداپتور را به پریز برق متصل کرده و سر دیگر آن را در سوکت DC واقع در کنار دستگاه فرو کنید. (مطابق شکل H)

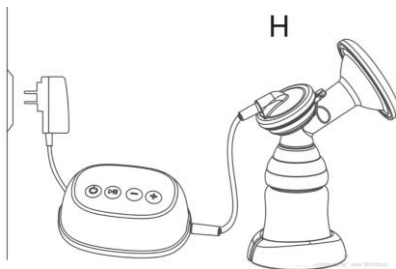

توضیحات صفحه نمایش و دکمه ها :

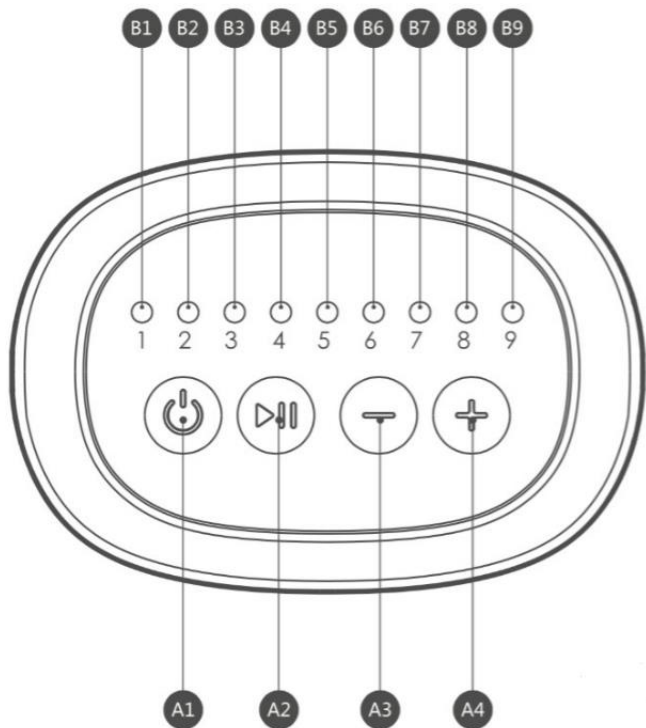

A1 (دکمه روشن / خاموش)

A2 (دکمه شروع / ایست)

A3 (سرعت مکش کمتر)

A4 (سرعت مکش بیشتر)

(B1 - B9) (L1 - L9) 9 سرعت مکش شیر

L1-L4: حالت ماساژ سینه، قدرت جذب پایین با ریتم سریع، آماده کردن سینه برای مکش شیر


L5-L9: حالت مکش شیر، شبیه سازی مکیدن نوزاد، ریتم مکش کند با قدرت جذب بالا جهت مکش شیر به بهترین نحو

♥ نحوه کارکرد دستگاه :

1 (قبل از استفاده از دستگاه دستان خود را بشویید و از اتصال تمامی اجزای دستگاه اطمینان حاصل کنید.


2 (روی یک صندلی راحت بنشینید بطوری که تحت هیچ فشاری نباشید. (قبل از شروع می توانید با ماساژ دادن یا گذاشتن حوله داغ روی سینه، نتیجه بهتری بگیرید) .

3 (نوک سینه خود را بطور کامل درون محفظه شیپور شکل شیر دوش قرار داده و با دست دیگر خود سینه را درون محفظه جوری قرار دهید تا کاملاً کیپ شده و هیچ هوایی از درون محفظه نتواند خارج شود. (مطابق شکل ①)

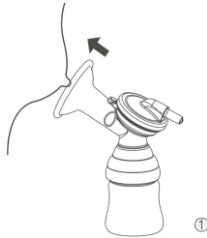

①

4) دستگاه را روشن کنید تا وارد حالت Stand by شود. صفحه نمایش ابتدا عددی را نشان می دهد که آخرین بار روی آن عدد دستگاه را خاموش کرده باشید و پس از چند ثانیه از حالت اول (L1) شروع به کار می کند. دستگاه بطور خودکار از L1 شروع به کار می کند و پس از 45 ثانیه به L2 پس از 45 ثانیه به L3 و 45 ثانیه بعد به L4 و 45 ثانیه بعد به L5 می رود که اولین حالت مکش عادی دستگاه شروع می شود. (مطابق شکل ②)

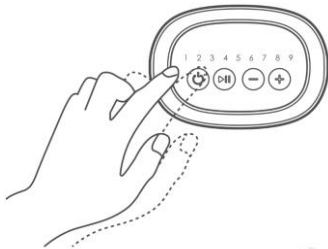

②

5) در این حالت (مکش عادی) شما می توانید شدت مکش را از L1-L9 تغییر دهید. دستگاه بصورت هوشمند شدت انتخابی شما را یاد گرفته و دفعه بعد که دستگاه را روشن کنید صفحه نمایش همان شدت را نمایش خواهد داد. (مطابق شکل ③)



♥ نکات مهم :

- لطفاً قبل از استفاده دفترچه را بطور کامل مطالعه کنید.
- از آداپتورهای متفرقه به هیچ وجه استفاده نکنید.
- از شست و شوی سری سیر دوش در آب خودداری کنید.
- از استریلیزه کردن ، گره زدن و پیچیدن شلنگ اتصال خودداری کنید.

♥ تمیز کردن دستگاه :

- ابتدا تمامی اجزایی که با سینه یا شیر تماس نداشته اند را از دستگاه اصلی جدا کنید.
- بلافاصله پس از استفاده این اجزا را بشویید تا از ایجاد باکتری جلوگیری شود.
- پس از شستن این اجزاء آنها را روی یک حوله قرار دهید تا خشک شوند.
- بطری، سری برگشت شیر، کاور محفظه ، سری ماساژ دهنده و سری پستانک را درون یک ظرف استریل بگذارید تا استریلیزه شوند.

محصولات هایتک با گارانتی فاره



MASSAGER

ماساژور



DIGITAL KITCHEN SCALE

ترازوی دیجیتال
آشپزخانه



DIGITAL BATHROOM SCALE

ترازوی دیجیتال



MISCELLANEOUS

سایر محصولات



AIR HUMIDIFIER

رطوبت ساز



BLOOD PRESSURE
MONITOR

فشار سنج



hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FARAH 