

دفترچه راهنمای فارسی

شیر دوش برقی

هایتک



مدل EBP - 3112

♥ مشخصات فنی دستگاه :

- صفحه نمایش LED با دکمه های لمسی
- جلوگیری از برگشت شیر هنگام دوشیدن با طراحی منحصر به فرد anti-reflux
- شارژر USB
- دو حالت مکش با قابلیت تنظیم سرعت هر حالت
- سری بسیار نرم ژله ای
- دارای حالت "Residual Milk Expression" جهت مکش تمامی شیر باقیمانده در انتهای کار

♥ اجزای دستگاه :


شماره	نام	جنس	دمای مطلوب	تعداد
1	روکش ضد خاک	PP	-20~ 120c°	1
2	سری ماساژ دهنده	سیلیکون مایع	-20~ 200c°	1
3	محافظ سینه	PP	-20~ +20c°	1
4	محافظ برگشت شیر	سیلیکون مایع	-20~ 200c°	1

5	روکش محافظ برگشت شیر	PP	-20~ 120c°	1
6	شلنگ اتصال	PP+PVC	-5~ 70c°	1
7	دریچه	سیلیکون مایع	-20~ 200c°	2
8	پایه	PP	-20~ 120c°	1
9	بطری (150ML)	PP	-20~ 120c°	1
10	دستگاه	ABS+PC	-20~ 80c°	1
11	کلاهک درپوش بطری	PP	-20~ 120c°	1
12	سری پیچی بطری	PP	-20~ 120c°	1
13	درپوش بطری	PP	-20~ 120c°	1
14	پستانک	سیلیکون مایع	-20~ 200c°	1
15	آداپتور و کابل USB	-----	-----	1



♥ نحوه سرهم کردن :


1) سری ماساژ دهنده سیلیکونی **2** را درون محفظه سینه **3** فرو کنید و از بسته شدن صحیح و محکم آنها مطمئن شوید. (مطابق شکل A)

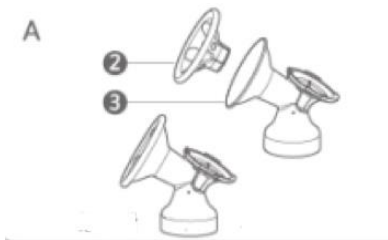

2) محافظ برگشت شیر **4** را درون محفظه پایینی مطابق شکل زیر (B) قرار دهید و روکش محافظ برگشت شیر **5** را روی محفظه پایینی پیچ کنید.



3) سری سیلیکونی 7 را مطابق شکل (C) به زیر سری پمپ 3 فرو کنید.

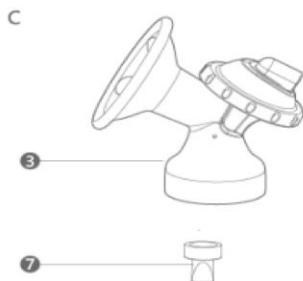

4) بطری (ظرف) شیر 9 را به زیر سری پمپ 3 پیچ کنید. (مطابق شکل D)



5) یک سر شلنگ اتصال را درون سوراخ واقع در بالای محافظ برگشت شیر فرو کرده و سر دیگر را درون سوراخ واقع در کنار دستگاه وارد کنید. (مطابق شکل E)

E



6) برای تعادل و کارایی بهتر، در هنگام Stand by ، بطری شیر را درون Base خود قرار دهید. (مطابق شکل F)

F




توجه : قبل از شروع به استفاده از اتصال تمامی اجزای دستگاه به درستی اطمینان حاصل کنید.

♥ اتصال به برق :

دوشاخه سیم آداپتور را به پریز برق متصل کرده و سر دیگر آن را به قسمت سوکت DC واقع در کنار دستگاه فرو کنید. (مطابق شکل G)



♥ توضیحات صفحه نمایش و دکمه ها :

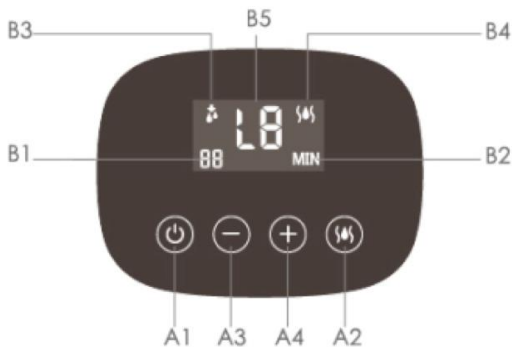

(A1 دکمه روشن / خاموش) Residual Milk Expression (A2 مکش باقیمانده شیر)

(A3 مکش آرامتر) (A4 مکش قوی تر)

(B1 نمایش زمان باقیمانده) (B2 نمایش واحد زمان) (B3 مکش شیر بحالت عادی)

(B4 مکش شیر باقیمانده (حالت RME)) (B5 نمایشگر قدرت مکش شیر)

● توضیح در مورد قدرت های مکش شیر (L1-L9)

L1-L4: حالت ماساژ عادی، قدرت جذب پایین با سرعت بالا ، آماده کردن سینه برای مکش شیر.


L5-L9: حالت مکش شیر عادی، شبیه سازی مک زدن بچه از سینه مادر، سرعت مکش پایین با قدرت جذب بالا جهت مکش شیر به بهترین نحو.

(RME)Residual Milk Expression ♥

با فشردن دکمه A2 دستگاه وارد حالت RME می شود که این حالت در انتهای عملیات شیر دوشی انجام می گیرد. این حالت دارای 5 قدرت مکش (L1-L5) می باشد. اگر به هر دلیلی پس از عملیات اولیه، شیری درون سینه مادر باقی مانده باشد، استفاده از این حالت موجب مکش تمامی باقیمانده شیر از سینه مادر می شود. پس از پایان این حالت دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

♥ نحوه کارکرد دستگاه :

- 1 (قبل از استفاده از دستگاه دستان خود را بشویید و از اتصال تمامی اجزای دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- 2 (روی یک صندلی راحت بنشینید بطوری که تحت هیچ فشاری نباشید. (قبل از شروع می توانید با ماساژ دادن یا گذاشتن حوله داغ روی سینه، نتیجه بهتری بگیرید) .
- 3 (نوک سینه خود را بطور کامل درون محفظه شیپور شکل شیر دوش قرار داده و با دست دیگر خود سینه را درون محفظه جوری قرار دهید تا کاملاً کیپ شده و هیچ هوایی از درون محفظه نتواند خارج شود. (مطابق شکل ①)

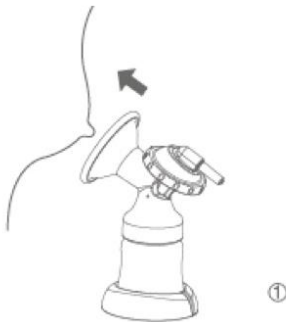

- 4 (دستگاه را روشن کنید تا وارد حالت Stand by شود. صفحه نمایش ابتدا عددی را نشان می دهد که آخرین بار روی آن عدد دستگاه را خاموش کرده باشید و پس از چند ثانیه از حالت اول (L1) شروع به کار می کند. دستگاه بطور خودکار از L1 شروع به کار می کند و پس از 45 ثانیه به L2 پس از 45 ثانیه به L3 و 45 ثانیه بعد به L4 و 45 ثانیه بعد به L5 می رود که اولین حالت مکش عادی دستگاه شروع می شود. (مطابق شکل ②)



5) در این حالت (مکش عادی) شما می توانید شدت مکش را از L1-L9 تغییر دهید. دستگاه بصورت هوشمند شدت انتخابی شما را یاد گرفته و دفعه بعد که دستگاه را روشن کنید صفحه نمایش همان شدت را نمایش خواهد داد. (مطابق شکل 3)



6) با فشردن دکمه “شش” دستگاه وارد حالت (RME) می شود سرعت مکش در این حالت می تواند بین L5-L1 تنظیم شود. توصیه می شود بعد از پایان عملیات شیر دوشی وارد این مرحله شوید تا تمامی شیر باقیمانده نیز در این مرحله دوشیده شود. لطفاً توجه داشته باشید که مدت کارکرد دستگاه بطور خودکار از L1 تا L9 ، 30 دقیقه می باشد.

♥ نکات مهم :

- لطفاً قبل از استفاده دفترچه را بطور کامل مطالعه کنید.
- از آداپتورهای متفرقه به هیچ وجه استفاده نکنید.
- از شست و شوی سری شیر دوش در آب خودداری کنید.
- از استریلیزه کردن ، گره زدن و پیچیدن شلنگ اتصال خودداری کنید.

♥ تمیز کردن دستگاه :

- ابتدا تمامی اجزایی که با سینه یا شیر تماس نداشته اند را از دستگاه اصلی جدا کنید.
- بلافاصله پس از استفاده این اجزا را بشویید تا از ایجاد باکتری جلوگیری شود.
- پس از شستن این اجزاء آنها را روی یک حوله قرار دهید تا خشک شوند.
- بطری، سری برگشت شیر، کاور محفظه ، سری ماساژ دهنده و سری پستانک را درون یک ظرف استریل بگذارید تا استریلیزه شوند.

محصولات هایتک با گارانتی فاره



MASSAGER

ماساژور



DIGITAL KITCHEN SCALE

ترازوی دیجیتال
آشپزخانه



DIGITAL BATHROOM SCALE

ترازوی دیجیتال



MISCELLANEOUS

سایر محصولات



AIR HUMIDIFIER

رطوبت ساز



BLOOD PRESSURE
MONITOR

فشار سنج



hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FARAH 